

ငွေနှင့်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ
ဆံပင်ပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု
၉၀% သည် အဘယ်ကြောင့် မ
အောင်မြင်ရသနည်း။

၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ၁၀၀% မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း။

Folli-Surge ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ၎င်းသည် "နောက်ထပ်ကုသမှုတစ်ခု" မဟုတ်ဘဲ သင်၏အိမ်သုံးပစ္စည်းများ (Folli-Fix, Folli-Activ) အားလုံးအတွက် "မီးပွားဖွင့်ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ဤသင်တန်းသည် ဆံပင်ပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏အမြင်ကို လုံးဝပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အား သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် အဆုံးစွန်လက်နက်ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။

လေ့ကျင့်ရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် အစီအစဉ်

01

လုပ်ငန်း၏အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

သမားရိုးကျနည်းလမ်းများ အဘယ်ကြောင့် မအောင်မြင်ကြောင်း ဖောက်သည်များ အား ပညာပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုအခြေခံကို တည်ဆောက်ပါ။

02

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်၏ နိယာမများ

Folli-Surge သည် အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များ၏ ထိရောက်မှုကို မည်သို့ အသက်ဝင်စေကြောင်းကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

03

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

High Pulse Micro-needling နှင့် သာမန် roller များကြား အဆုံးအဖြတ်ကွာခြားချက်

04

ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေး စကားပြောနည်းများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်း

သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများဖြင့် ဖောက်သည်တိုင်းကို မည်သို့ ဆွဲဆောင်ရုံးတိုက်ရမည်ကို လေ့လာပါ။

ဤသည်မှာ ထုတ်ကုန်လေ့ကျင့်ရေးတစ်ခုမျှသာမကဘဲ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမှန်တရားများနှင့် သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများဖြင့် ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုကို မည်သို့ရယူပြီး မြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို ရရှိအောင်မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသိပညာအချက်တိုင်းသည် ဖောက်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့်အခါ သင်၏ယုံကြည်မှုနှင့် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၁

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်သူများကို မလွဲမသွေ ပညာ ပေးရမည့် ရက်စက်သော အမှန်တရား

လေ့ကျင့်ရေးအဓိကအချက်: ၎င်းသည် ဝယ်သူတိုင်းထံ သင်မဖြစ်မနေ ပြောပြရမည့် အဓိကအယူအဆဖြစ်သည်။ သူတို့ငွေမသုံးစွဲမီ၊ အရင်က အသုံးစွဲခဲ့သောငွေများ အဘယ်ကြောင့် အလကားဖြစ်ခဲ့သည်ကို သူတို့နားလည်ထားရမည်။

ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဝင်ရောက်စရာ: သင်တွေးနေသလား - အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးကြီးသော ဆံပင်ပေါက်ဆေးရည်များ သုံးစွဲပြီး၊ ဖြည့်စွက်ဆေးများ သောက်သုံးကာ၊ လစဉ် ဆံပင်ပေါက်ရေးစင်တာသို့ သွားနေသော်လည်း ဆံပင်များ ဆက်လက်ကျွတ်နေရသနည်း။

အဖြေက ရှိရင်းပါသည်။ သင်သည် အမြဲတမ်း ပြင်းထန်သော အမှားနှစ်ခုကို ကျူးလွန်နေခဲ့သည်။

အမှားဆိုးကြီးနံပါတ် (၁)။ အပေါ်ယံမျှသာကုသခြင်း

သိပ္ပံနည်းကျအမှန်တရား

သင်၏ဦးရေပြားတွင် "အရေပြားအပေါ်ဆုံးလွှာ" (Stratum Corneum) ဟုခေါ်သော အကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောအလုပ်မှာ "အပြင်ဘက်မှ အရာအားလုံးကို တားဆီးရန်" ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လူသားတို့၏ သန်းနှင့်ချီသောနှစ်များတစ်လျှောက် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှ ရရှိလာသော သဘာဝအကာအကွယ် ယန္တရားဖြစ်သော်လည်း ဆံပင်ပေါက်ခြင်းကုသမှုအတွက် အကြီးမားဆုံး အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။

ဆိုးရွားသောရလဒ်

သင်အိမ်တွင်လိမ်းနေသော ဈေးကြီးသည့် ဆံပင်ပေါက်ဆေးများ (Minoxidil ကဲ့သို့ ဆေးဝါးအဆင့်မီသည့် ဆေးများပင်ဖြစ်စေ) သည် ၉၀% ကျော်သည် ဤအကာအကွယ်အလွှာကို လုံးဝမထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဦးရေပြားပေါ်တွင် အလဟဿဖြစ်နေပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ရိုးရာလိမ်းဆေးများ၏ စိမ့်ဝင်မှုနှုန်းသည် ၅-၈% သာရှိကြောင်း ပြသနေသည်။

နောက်ဆုံး ကောက်ချက်

၎င်းသည် အထူကြီးဖြစ်သော မိုးကာအကင်္ဂါပေါ်မှ အာဟာရဓာတ်များ ထိုးသွင်းပေးသကဲ့သို့ပင်။ လုံးဝအကျိုးမရှိပါ။ သင်တစ်လလျှင် ရာနှင့်ချီသော သို့မဟုတ် ထောင်နှင့်ချီသော ကျပ်ငွေများဖြင့် ဝယ်ယူသည့် ဆံပင်ပေါက်ဆေးများ၏ ၉၀% ကျော်သော အနိမ့်စွမ်းရည်များသည် ခေါင်းလျှော်သည့်အခါ ရေဆင်းပိုက်ထဲသို့ စီးဆင်းသွားပါသည်။

 **ဖောက်သည် ပညာပေးပြောဆိုနည်း**

"သင်သိပါသလား။ သင်ယခုအသုံးပြုနေသော ဆံပင်ပေါက်ဆေးသည် ရေစိုခံအဝတ်ပေါ်ရေလောင်းပြီး မြေကြီးထဲ စိမ့်ဝင်သွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နေသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အရေပြားအပေါ်ဆုံးလွှာဆိုသော သဘာဝအကာအကွယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးသော်လည်း ကုသရေးအစိတ်အပိုင်းများ၏ ၉၀% ကို အပြင်ဘက်တွင် ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။"

ဒုတိယအချက်- ဆံပင်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်မိသော အမှားများ (နားမလည်သူကို ရှင်းပြခြင်းနှင့်တူသည်)

သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်

ရေရှည် ဆံပင်ကျွတ်နေသော ဆံပင်ဥများသည် "အိပ်ပျော်နေသောအခြေအနေ" တွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ရောင်ရမ်းနေခြင်း၊ စွမ်းအင် (ATP) ချို့တဲ့နေခြင်းနှင့် ဆံပင်ပေါက်ရန် လှုံ့ဆော်မှုများကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဆေးပညာ လေ့လာမှုများအရ အိပ်ပျော်နေသော ဆံပင်ဥများ၏ Mitochondria လုပ်ငန်းဆောင်တာသည် ၇၀% ကျော်အထိ ကျဆင်းပြီး ဆဲလ်အတွင်းရှိ ATP ပမာဏ သိသိသာသာ နည်းပါးနေကြောင်း ဖော်ပြသည်။

ခါးသီးသောရလဒ်

သင် ဆေးဖက်ဝင် အပင်များဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (herbal care) သို့မဟုတ် PRP ပြုလုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ ပါးစပ်မှ ဖြည့်စွက်ဆေးများ သောက်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ဤ "လှုံ့ဆော်မှု" နှင့် "အာဟာရ" များသည် ဆံပင်ဥများဆီသို့ ရောက်ရှိသော်လည်း "အိပ်ပျော်နေသော" ဆံပင်ဥများသည် ၎င်းတို့ကို "လက်ခံ" ရန်နှင့် "အသုံးပြု" ရန် စွမ်းအင် လုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည် ပါဝါပိတ်ထားသော ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို အင်အားအကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ် အမိန့်များ ပေးပို့နေခြင်းကဲ့သို့ပင် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံး ကောက်ချက်

၎င်းသည် ပလပ်မတပ်ရသေးသော ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင် အင်အားအကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ်ကို ထည့်သွင်းပေးနေခြင်းနှင့် တူပါသည်။ အချည်းနှီးပင် ပင်ပန်းရုံသာရှိမည်။ ဆံပင်ဥဆဲလ်များတွင် ကြီးထွားမှု လှုံ့ဆော်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်မရှိပါ။ ဈေးအကြီးဆုံး ကြီးထွားမှု အချက်အလက်များနှင့် အာဟာရဓာတ်များသည် ပစ်မှတ်ဧရိယာသို့ ရောက်ရှိလာသော်လည်း အသုံးမပြုဘဲ ပျက်စီးသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။



ဖောက်သည် ပညာပေး ပြောဆိုပုံ

"သင်သိပါသလား။ သင်အခုသုံးနေတဲ့ ဆံပင်ပေါက်ဆေးရည်တွေဟာ ရေစိုခံအဝတ်ပေါ်ကို ရေလောင်းချပြီး မြေကြီးထဲကို စိမ့်ဝင်ဖို့ မျှော်လင့်နေတာနဲ့တူပါတယ်။ Corneum အလွှာဆိုတဲ့ သဘာဝအကာအကွယ်အတားအဆီးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးပေမဲ့ ၉၀% ကျော်သော ဆေးဘက်ဝင် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အပြင်မှာပဲ ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။"

အမှားကြီးနှစ်ခု၏ ပူးပေါင်း ဘေးအန္တရာယ်

၉၀% အပြင်တွင် ပိတ်ဆို့ခံရသည်
အရေပြားအပေါ်ဆုံးလွှာ အတားအဆီးကြောင့်
ဈေးကြီးသော ထိရောက်သည့် ပါဝင်ပစ္စည်း
များသည် ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များသို့ မရောက်
ရှိနိုင်ပါ

+

ကျန် ၁၀% အလဟဿ ဖြစ်သွားသည်
စိမ့်ဝင်သွားရင်တောင် အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဆံပင်မွေး
ညှင်းပေါက်တွေမှာ အဲဒီပစ္စည်းတွေကို အသုံးချဖို့
စွမ်းအင်မရှိဘူး

=

၁၀၀% ကျရှုံးခြင်း
ဒါကြောင့် ရိုးရာဆံပင်ပြန်ပေါက်စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုနှုန်းက
ဒီလောက်နိမ့်ရတာပါ

ဖောက်သည်များသည် လစဉ် ၅၀၀-၂၀၀၀ ယွမ် သုံးစွဲသော်လည်း ၅% အောက်သာ လက်တွေ့အကျိုးရရှိသည်။ ဒါဟာ ထုတ်ကုန်
အရည်အသွေး ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အခြေခံဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အတားအဆီး ပြဿနာပါ။ "အတားအဆီးဖြိုခွဲခြင်း" နဲ့
"စွမ်းအင်ပေးခြင်း" ဆိုတဲ့ အဓိကပြဿနာ နှစ်ခုကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ဘယ်ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေတဲ့ ထုတ်ကုန်မဆို ပိုက်ဆံဖြုန်းရာရောက်
ပါလိမ့်မယ်။

အပိုင်း (၂)

Folli-Surge ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်

"မီးစတင်ခြင်း" နှင့် "အတားအဆီးဖြုတ်ခြင်း" ၏ တော်လှန်ရေး

ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည် ၉၀% ကျော်မှုကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည် ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်မည့် နှစ်ဆင့် ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။

1

အဆင့် (၁): ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင်

Folli-Surge ဖြင့် "မီးစတင်ခြင်း" နှင့် "အတားအဆီးဖြုတ်ခြင်း" ကို အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ကာ စုပ်ယူမှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးပါ။

2

အဆင့် (၂): အိမ်တွင်

Folli-Fix နှင့် Folli-Activ ဖြင့် "စဉ်ဆက်မပြတ်လောင်စာ" ကို ထောက်ပံ့ပေးကာ ကြီးထွားမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။

အဓိကနားလည်မှု: ၎င်းသည် သီးခြားထုတ်ကုန်နှစ်ခုမဟုတ်ဘဲ၊ ပြည့်စုံပြီး မကွဲကွဲနိုင်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အသက်သွင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းမဆို ပျောက်ဆုံးပါက စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် သုညနီးပါးအထိ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

အဆုံးစွန်သော ဥပမာ- ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် အာဟာရ၏ ပြီးပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်မှု

❌ **Folli-Surge မလုပ်ဘဲ အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များသာ သုံးစွဲခြင်း**
="ပရိုတင်းမှုန့်ပဲစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုံးဝမလုပ်တာ"

သင့်ပိုက်ဆံများ အလဟဿဖြစ်သွားပါမည်။ အကြောင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ် (ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်) သည် ဤအာဟာရများကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားများ ရုတ်တရက်ကြီးထွားလာခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များလည်း အသက်ဝင်စေရန် အချက်ပြမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

❌ **အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်မှုမလုပ်ဘဲ ရိုးရာစောင့်ရှောက်မှုသာ ပြုလုပ်ခြင်း**
="တစ်လတစ်ခါသာ gym သွားတာ"

သင် ဘယ်တော့မှ ကြွက်သား (ဆံပင်) ကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ မကြာခဏ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သည့်ကြီးထွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မဆို အရေးကြီးသော အချက်များဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသော လှုံ့ဆော်မှုသည် ရေရှည်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

✅ **Folli-Surge + အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်မှု**

="ကျွမ်းကျင်သော HIIT လေ့ကျင့်ခန်း + နေ့စဉ် မှာယူထားသော ပရိုတင်းဓာတ်"

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျွမ်းကျင်သော Super HIIT (High-Intensity Interval Training) ကို ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကြွက်သားများကို အပြည့်အဝ အသက်ဝင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ထားသည့် ပရိုတင်းဓာတ်ကို နေ့စဉ် ဖြည့်စွက်ရပါမည်။ ရလဒ်လား? ၁၀၀% အသက်ဝင်ခြင်း၊ ၁၀၀% စုပ်ယူခြင်း။

အပိုင်း ၃

Folli-Surge ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

၎င်းသည် "မီးထိုးခြင်း" နှင့် "နံရံဖောက်ခြင်း" တို့ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

Folli-Surge ကုသမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် "နိုးကြားမှုအခမ်းအနား" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ဘဲ ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ နိယာမများအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သုံးဆင့် နိုးကြားမှု ပရိုတိုကောလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆင့်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံနှင့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိသည်။

01

PDT အဝါရောင်အလင်းဖြင့် ကြိုတင်ကုသခြင်း

ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ချခြင်းနှင့် သွေးကြောငယ်များ၏ လည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

02

သွေးခွန်နှုန်းမြင့် micro-needling ဖြင့် နံရံဖောက်ခြင်း

ဒေါင်လိုက် ဆေးဝါးဖြတ်သန်းလမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးခြင်း

03

LLLT အနီရောင်အလင်းဖြင့် မီးထိုးခြင်း

မိုက်တိုကွန်ဒရီးယား စွမ်းအင်ကို နိုးကြားစေခြင်း

အဆင့် ၁: "ငြိမ်းချမ်းရေး ဖန်တီးသူ"

PDT အဝါရောင် အလင်း (590nm) ကြိုတင် ကုသမှု

၎င်းက ဘာလုပ်ပေးသလဲ?

"နံရံဖြိုဖျက်ခြင်း" မပြုလုပ်မီ၊ အဝါရောင် အလင်းသည် ဦးစွာ ဦးရေပြား၏ အခြေခံ ရောင်ရမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ 590nm လှိုင်းအလျားရှိ အဝါရောင် အလင်းသည် အရေပြား၏ အပေါ်ယံ အလွှာရှိ hemoglobin နှင့် cytochrome C oxidase တို့မှ စုပ်ယူနိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှု ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် သွေးကြောများ ကျယ်စေခြင်း အာနိသင်များကို ထုတ်ပေးသည်။

အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ အရေးကြီးသနည်း။

နာတာရှည် ဆံပင်ကျုတ်သူများ၏ ဦးရေပြားသည် အများအားဖြင့် ရောင်ရမ်းမှု အခြေအနေ နည်းပါးပြီး ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်ပတ်လည်ရှိ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းမွန်ပါ။ ၎င်းသည် "ရေစိုနေသော သစ်သား" မီးရှို့ရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် တူသည်။ အဝါရောင် အလင်းဖြင့် ကြိုတင် ကုသခြင်းသည် "မီးညှိခြင်း" မပြုလုပ်မီ "ရေစိုနေသော သစ်သား" (ရောင်ရမ်းနေသော ဦးရေပြား) ကို အရင် ခြောက်သွေ့စေသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆက်တွဲ micro-needling နှင့် အနီရောင် အလင်း ကုသမှုများသည် "သန့်ရှင်းသော" ရောင်ရမ်းမှု နည်းပါးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကောင်းဆုံး အာနိသင်ကို ပေးနိုင်ရန် သေချာစေသည်။

လက်တွေ့ ယန္တရားများ

- ရောင်ရမ်းမှု ဆန့်ကျင်ခြင်း: pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , TNF- α) အဆင့်များကို လျှော့ချသည်။
- သွေးကြော ကျယ်စေခြင်း: ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက် ပတ်လည်ရှိ သွေးစီးဆင်းမှု ကို 15-25% တိုးမြှင့်ပေးသည်။
- ဆဲလ် ညီညွတ်မှု: ဆဲလ် အမြွှေးပါး အလားအလာကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုများအပေါ် တုံ့ပြန်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
- နာကျင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု: micro-needling လုပ်စဉ် မသက်မသာ ခံစားရမှုကို လျှော့ချပေးသည်။



ပြောဆိုရမည့် အချက်များ

"ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်ရမ်းနေသော ဦးရေပြားပေါ်တွင် micro-needling ကို တိုက်ရိုက် မပြုလုပ်ပါ။ အဝါရောင် အလင်းဖြင့် ကြိုတင် ကုသခြင်းသည် ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပြီး သင်၏ ဦးရေပြားသည် လက်ခံရန် အသင့်တော်ဆုံး အခြေအနေတွင် ရှိနေစေရန် သေချာစေပါသည်။"

အဆင့် နှစ်: "အတားအဆီးကိုဖြိုခွဲသူ" သွေးခုန်နှုန်းမြှင့် micro-needling နည်းပညာ

၎င်းသည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သနည်း။

၎င်းသည် သင့်အရေပြား၏ အပေါ်ဆုံးလွှာ (stratum corneum) တွင် ထောင်နှင့် ချီသော "micro-channels" များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော အပေါက်ဖောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိကျသော၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သော အနက်ရှိ သည့် ၉၀ ဒီဂရီ ထောင့်မှန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြွန်များဖြစ်သည်။

အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ အရေးပါသနည်း။

၎င်းသည် သင့်၏ **Folli-Fix (Minoxidil)** အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရာ လိမ်းဆေးများသည် ကြုံတွေ့ရသော အကြီးမားဆုံး အတားအဆီးဖြစ်သည့် stratum corneum အတားအဆီးကို လုံးဝ ဖောက်ဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ micro-channels များ၏ အနက်ကို 0.5-1.5mm အထိ တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ထား ပြီး ဆံပင်မွေးမြှစ်များထံသို့ ကွက်တိရောက်ရှိစေသော်လည်း အလွန်အကျွံ ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေပါ။

နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

- ပြွန်သိပ်သည်းဆ: တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာလျှင် micro-channels ၁၀၀၀-၂၀၀၀ ခု
- ပြွန်အနက်: 0.5-1.5mm ချိန်ညှိနိုင်သည် (ဦးရေပြားအခြေအနေအရ)
- ပြွန်အချင်း: ၁၅၀-၂၀၀ မိုက်ခရိုန
- သွေးခုန်နှုန်းကြိမ်နှုန်း: တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀၀၀-၂၀၀၀ ကြိမ်
- ဖွင့်ချိန်: micro-channels များသည် ၄-၆ နာရီကြာ ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်။

❏ အဓိက အားသာချက်များ

ရိုးရာလိမ်းဆေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ micro-channels မှတဆင့် ပို့ဆောင်သော active ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ဇီဝ-စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည် ၁၀၀၀-၄၀၀၀% အထိ တိုးတက်လာပါသည်။ ၎င်းသည် အနည်းငယ် တိုးတက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော ခုန်ပျံ့ကျော်လွှား ခြင်းဖြစ်သည်။

အဆင့် ၃: "စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဌာန"

LLLT အနီရောင်အလင်း (630-660nm) ဖြင့် လှုံ့ဆော်ခြင်း

၎င်းသည် အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်သနည်း။

"နံရံဖြိုခွဲခြင်း" နောက်ပိုင်းတွင် အနီရောင်အလင်းသည် **မိုက်ခရိုချန်နယ်များ အတွင်း နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်ပြီး ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက် Mitochondria (ဆဲလ်များ၏ ဘက်ထရီ) မှ ပြင်းထန်စွာစုပ်ယူ** သဖြင့် ATP (ဆဲလ်စွမ်းအင်) ထုတ်လုပ်မှုမှာ ****အဆများစွာ မြင့်တက်**** လာသည်။ ၎င်းသည် Photobiomodulation ၏ အဓိက အသုံးချမှုဖြစ်သည်။

၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။

ဤသည်မှာ "မီးပွားပေးခြင်း" ပင်ဖြစ်သည်! ၎င်းသည် "အိပ်ပျော်နေသော" ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များကို အတင်းအကျပ် နှိုးဆွပေးသည်။ အနီရောင်အလင်းကို Cytochrome C Oxidase (Mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၏ အဓိက အင်ဇိုင်း) မှ စုပ်ယူပြီးနောက် Mitochondrial ၏ ATP ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုက်ရိုက်မြှင့်တင်ပေးပြီး Wnt/ β -catenin signal pathway ကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဆံပင်ကြီးထွားမှု၏ "ပင်မ ခလုတ်" ဖြစ်သည်။

ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ

- **ATP ပေါင်းစပ်ခြင်း:** Mitochondrial ATP ထုတ်လုပ်မှု 150-200% တိုးလာခြင်း
- **အချက်ပြလှုံ့ဆော်ခြင်း:** Wnt/ β -catenin pathway စတင်ခြင်း
- **သွေးကြောဖွဲ့စည်းခြင်း:** VEGF ဖော်ပြမှုကို လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက် သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေခြင်း
- **ဆဲလ်ပွားများခြင်း:** ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက် ပင်မဆဲလ်များ ကွဲပြားခြင်းနှင့် ပွားများခြင်းကို မြှင့်တင်ခြင်း
- **ကြီးထွားမှုကာလ ရှည်ကြာခြင်း:** ဆံပင်ကို Telogen phase မှ Anagen phase သို့ တွန်းပို့ခြင်း

❏ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား


LLLT ကုသမှုသည် ဆံပင်သိပ်သည်းဆကို 35-40% တိုးစေပြီး ဆံပင်အချင်းကို 18-25% တိုးစေကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။ သို့သော် ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များသည် ဤအချက်ပြမှုများကို "လက်ခံနိုင်" ရမည်—ထို့ကြောင့် "နံရံဖြိုခွဲခြင်း" ကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

သုံးဆင့်ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှု၏စွမ်းအား

$$1 + 1 + 1 > 10$$

အဝါရောင်အလင်းဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

ရောင်ရမ်းမှုနည်းပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းသည့် "သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်" ကိုဖန်တီးခြင်း

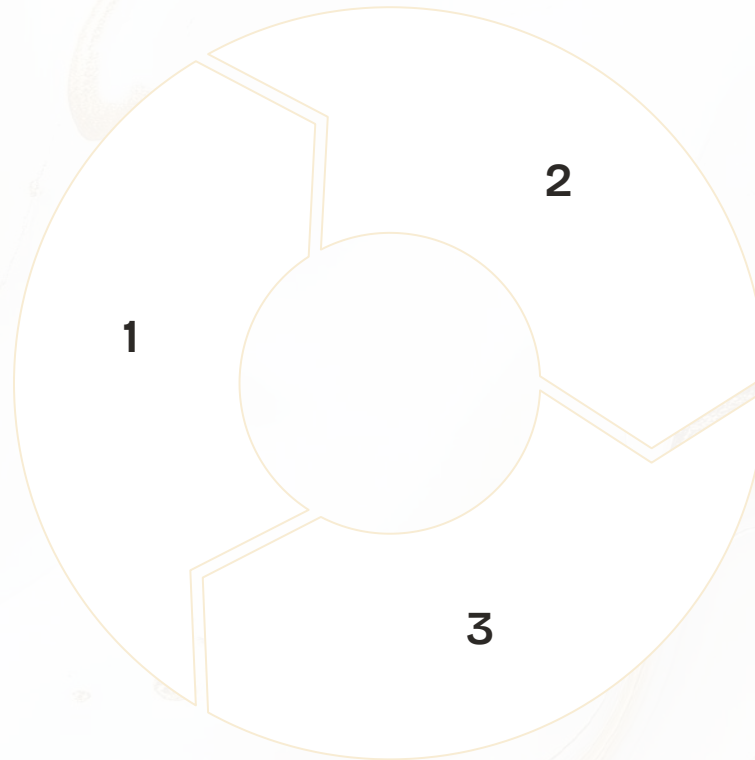

Microneedle ဖြင့်နံရံများဖောက်ခြင်း

"ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ" ကိုဖွင့်ခြင်း၊ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာအတားအဆီးကိုကျော်လွှားခြင်း

အနီရောင်အလင်းဖြင့်အစပျိုးခြင်း

ပြွန်များအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်ပြီး Mitochondria ကိုလှုံ့ဆော်ကာ ကြီးထွားမှုအချက်ပြမှုများကိုစတင်ခြင်း

မည်သည့်နည်းပညာတစ်ခုတည်းကိုမဆို အသုံးပြုပါက အကျိုးသက်ရောက်မှု အလွန်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ သို့သော် သုံးမျိုးစလုံးကို တိကျသော အစီအစဉ်အတိုင်း ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါတွင် ပူးပေါင်းတိုးပွားလာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အဝါရောင်အလင်းသည် microneedle အတွက် အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပြီး microneedle သည် အနီရောင်အလင်းအတွက် နက်ရှိုင်းသောလမ်းကြောင်းများကို ဖွင့်ပေးကာ အနီရောင်အလင်းသည် စွမ်းအင်ကို ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်၏ ဗဟိုသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပေးပါသည်။ ၎င်းသည် Folli-Surge ၏ "တုပ၍မရနိုင်သော" ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသောနည်းပညာမဟုတ်ဘဲ **တိကျစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပူးပေါင်းစနစ်**တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

လေ့ကျင့်ရေးအချက်: သုံးစွဲသူများအား ၎င်းသည် သီးခြားကုသမှုသုံးမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြည့်စုံပြီး ခွဲခြား၍မရသော "လှုံ့ဆော်မှုပရိုတိုကော" တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားပါ။ မည်သည့်အဆင့်ကိုမဆို ချန်လှပ်ထားပါက အကျိုးသက်ရောက်မှုများ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း (၄)

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အထွတ်အထိပ်

အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များသည် "အသက်ဝင်စေခြင်း" ကို မည်သို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း
မည်နည်း။

အဓိကနားလည်မှု: Folli-Surge ကုထုံးသည် အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘဲ အစမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ဆံပင်အိတ်များကို "အိပ်ပျော်နေခြင်း" မှ "အလွန်စုပ်ယူ
နိုင်သော ရေမြှုပ်" နှင့် "ဖိစပ်မှုမှ မြင့်မားခြင်း" ဟူသော ရွှေ့ရောင်အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

ယခုအခါတွင် သင်၏အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များသည် "အလဟဿဖြစ်ခြင်း" မဟုတ်ဘဲ "မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လောင်စာ" ဖြစ်လာသည်။
ဤရွှေ့ရောင်အခွင့်အရေးကာလသည် ၄-၆ လအထိ ကြာမြင့်ပြီး ကုထုံး၏အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့်
အရေးကြီးသောကာလဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် မှန်ကန်သော အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များကို မပေးပါက ခုံးပျံ့လွှတ်တင်စင်ကို တည်ဆောက်
ပြီး လောင်စာမဖြည့်ခြင်းနှင့်တူပြီး ယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံး အချည်းအနှီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။

Folli-Fix: 外用 Minoxidil + Compound Peptide

90% အလဟသဖြစ်ခြင်းမှ 100% စုပ်ယူမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း

Folli-Surge ဖန်တီးသော အခြေအနေ

- 1. "ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ": မြင့်မားသော pulse micro-needling ဖြင့် ဖွင့်ထားသော တိကျသောလမ်းကြောင်းများ
- 2. "စွမ်းအင်ပြည့်ဝခြင်း": LLLT အနီရောင်အလင်းဖြင့် ATP များဖြင့် ဖြည့်တင်းထားသော ဆဲလ်များ
- 3. "အချက်ပြမှု ပွင့်နေခြင်း": Wnt/ β -catenin လမ်းကြောင်းသည် အသက်ဝင်နေသောအခြေအနေတွင် ရှိနေခြင်း
- 4. "လက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေခြင်း": ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များ၏ receptors များသည် အဆင့်မြင့်လာပြီး ကြီးထွားမှုအချက်ပြမှုများ အပေါ်အလွန်အမင်း တုံ့ပြန်မှုရှိခြင်း

 **အချိန်ကာလ**

Micro-channels များသည် ကုသမှုပြီးနောက် ၄-၆ နာရီအတွင်း အများဆုံးပွင့်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပထမ ၄၈ နာရီအတွင်း ဆေးစိမ့်ဝင်မှုနှုန်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေထက် **အဆ ၄၀-၅၀ ပိုများသည်။**

Minoxidil ၏ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှု ယခင်အခြေအနေ

၉၀% မှာ stratum corneum မှ ပိတ်ဆို့ထားပြီး ၅% အောက်သာ ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များသို့ ရောက်ရှိကာ ရောက်ရှိချိန်တွင် ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များသည် "တုံ့ပြန်မှု နည်းသော" အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။

လက်ရှိအခြေအနေ

၎င်းသည် "တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ခုံးကျည်" ကဲ့သို့ပင် "ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ" မှတဆင့် အတားအဆီးများကို ၁၀၀% ရှောင်ရှားကာ ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များ၏ အမြစ်ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ("Potassium Channel Opener" အဖြစ်) "ကြီးထွားမှုကာလကို ရှည်စေခြင်း" အချက်ပြမှုကို ယခုအခါ "စွမ်းအင်ပြည့်ဝသော" ဆဲလ်များက ၁၀၀% လက်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်သည်။

Compound Peptide / Herbal Extract များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

GHK-Cu blue copper peptide, ginseng extract စသည့် ဤမော်လီကျူးကြီးများသည် ယခင်က လုံးဝမစိမ့်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် Minoxidil ၏ "အခွင့်အရေးယူ" အတူတကွ နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်ပြီး "နိုးထလာသော" ဆဲလ်များက DNA ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်ကွဲခြင်းအတွက် ချက်ချင်းအသုံးပြုသည်။

Folli-Activ: သောက်ဆေးဖြည့်စွက်စာ အတွင်းအပြင် နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်တဲ့ "ညှပ်ကပ်တိုက်ခိုက်မှု"

Folli-Surge ဖန်တီးထားသော အခြေအနေ

"ဇီဝဖြစ်စဉ် မြှင့်မားမှုသတိပေးချက်": micro-needling ကြောင့် အသက်ဝင်လာသော Wnt/ β -catenin signal pathway သည် "အော်ဟစ်နေသည်" နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အား **"ဆံပင်ကို ချက်ချင်းစတင်ထုတ်လုပ်ပါ!"** ဟု အမိန့်ပေးနေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ယခုအခါ "အလွန်အမင်း ဆာလောင်နေပြီး" ကုန်ကြမ်းများ အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည်။ ၎င်းသည် တိုတောင်းသော်လည်း အားကောင်းသော anabolic window ဖြစ်သည်။

Saw Palmetto: အတွင်းပိုင်း ကာကွယ်ရေး

၎င်းသည် "ညှပ်ကပ်တိုက်ခိုက်မှု" ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Folli-Surge သည် ဆံပင် follicles များကို ပြင်ပမှ အသက်ဝင်စေပြီး Saw Palmetto သည် အတွင်းပိုင်း (သွေးထဲတွင်) **5 α -reductase** ကို တားဆီးခြင်းဖြင့် DHT (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၏ တရားခံ) ထုတ်လုပ်မှုကို ပိတ်ဆို့သည်။ တစ်ဖက်တွင် ကြီးထွားမှုကို အသက်ဝင်စေပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ရန်သူများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာကို ဖန်တီးပေးသည်။

Biotin, Zinc, Selenium: အဓိက ကိရိယာများ

ယခင်အခြေအနေ: သာမန် ဖြည့်စွက်စာများသာဖြစ်ပြီး အာနိသင် အားနည်းသည်။

ယခုအခြေအနေ: နီမြန်းသော အလင်းရောင်ဖြင့် ATP ပြည့်နေသော ဆဲလ်များသည် keratin ကို "အရူးအမူး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ရန်" ကြိုးစားနေကြသော်လည်း ကိရိယာများ မလုံလောက်ပါ။ Biotin နှင့် Zinc တို့သည် keratin ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ရန် **"မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တွဲဖက်အချက်များ"** ဖြစ်သည်။ ယခု Folli-Activ ကို သောက်သုံးခြင်းသည် လိုအပ်နေသော "ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့" (ဆံပင် follicles ဆဲလ်များ) ထံ ကိရိယာများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တူသည်။

Amino Acids: အဆောက်အဦး အုတ်များ

ယခင်: ကုန်ကြမ်းများသာ။ ယခု: အသက်ဝင်လာသော ဆံပင် follicles များတွင် "ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့" (ဆဲလ်များ)၊ "စွမ်းအင်" (ATP) နှင့် "ကိရိယာများ" (Biotin/Zinc) ရှိပြီး Folli-Activ က "ဆံပင်အသစ်" တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော "တိကျသော အုတ်များ" (keratin precursors) ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Dr. M အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်မှု အစုံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆက်လက်အာဟာရဖြည့်တင်းခြင်း

ကုသမှုအပြီး ပထမနေ့

1

ဆေးကြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ- သေးငယ်သောပြွန်များ ပွင့်နေစေရန်၊ အလုံပိတ်ပစ္စည်းများနှင့် ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာအချက်များ ဆက်လက်စိမ့်ဝင်နိုင်ရန်။ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်ကုန်တစ်ခုမျှ မသုံးရ။

နေ့စဉ် Folli-Activ ကို သောက်သုံးပါ- ကုသမှုခံယူသည့်နေ့မှစ၍ သောက်ဆေးဖြည့်စွက်စာများကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသက်ဝင်နေသော ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များကို အတွင်းပိုင်းမှ အာဟာရ ပံ့ပိုးပေးပါ။

ကုသမှုအပြီး တတိယနေ့မှစ၍

3

Dr. M Hokkaido Seaweed Shampoo- ညင်သာစွာ သန့်စင်ပေးခြင်း။ Fucoidan နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ နူးညံ့သက်သာစေခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစွမ်းပြီး "ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ" အနာကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သန့်ရှင်း၍ ကူးစက်မှုမရှိစေရန် သေချာစေပါသည်။

Folli-Fix Topical Minoxidil- Folli-Fix ကို နေ့စဉ်ဆက်လက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် microchannels များ အနာကျက်သည့်ကာလ တစ်လျှောက် ဆက်လက်ကြီးထွားမှု အချက်ပြမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များ ကျန်းမာစွာ ကြီးထွားမှုကို အားပေးပါသည်။

ကုသမှုအပြီး ဒုတိယနေ့

2

Dr. M Hydrolyzed Nutrient Solution- ဦးရေပြားအတွက် "ပထမဆုံးအစာ"။ Hydrolyzed protein မော်လီကျူးများသည် အလွန်သေးငယ်သဖြင့် microchannels များ အပြည့်အဝမပိတ်မီ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ပြင်ပပြုပြင်ရေးပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးကာ ဆံပင်သားကို ခိုင်မာစေသည်။

Folli-Fix Topical Minoxidil- ဤအချိန်တွင် microchannels များ ပွင့်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးစိမ့်ဝင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဆေးအာနိသင် အများဆုံးရရှိရန် Folli-Fix ကို စတင်အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း

4

၁၀% SLES/SLS ထက်ပိုသော ပြင်းထန်သည့် မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ဆပ်ပြာများ (surfactants) ပါဝင်သည့် သာမန်ခေါင်းလျှော်ရည်များကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၎င်းသည် အနာကျက်နေပြီး ကြီးထွားလာနေသော ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်များကို ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဦးရေပြားသည် Folli-Surge ကုသမှုအပြီးတွင် အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်နေသော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ သာမန်ခေါင်းလျှော်ရည်များရှိ ပြင်းထန်သော မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ဆပ်ပြာများသည် (strong surfactants) ကပ်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်သော ယားယံမှုကို ဖြစ်စေပြီး ကုသမှု၏ ရလဒ်များကို ပျက်စီးစေပါသည်။ Dr. M အစုံသည် ဤအထူးအခြေအနေအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ညင်သာသော စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၅: နည်းပညာလျှို့ဝှက်ချက် ထုတ်ဖော်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ Folli-Surge က ဘာကြောင့် "တုပ၍မရနိုင်" ရတာလဲ။

လေ့ကျင့်ရေးအဓိကအချက်: "ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စနစ်" တစ်ခု လိုအပ်ကြောင်း ဖောက်သည်ကို သင် ဆွဲဆောင်ပြီးနောက် သူတို့က "ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တခြားဆိုင်မှာ micro-needling လုပ်လို့မရတာလဲ။" လို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက စကားပြောဆိုမှုကို အပြီးသတ်ဖို့ အချိန်ပါပဲ။

ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး သတိပေးချက်: "အရေပြားအစုံအလင်ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှု" (micro-channeling) အားလုံးက တူညီကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးသက်သာတဲ့ အစားထိုးနည်းလမ်းတွေက ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အပြင် အန္တရာယ်တောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

ပြင်းထန်သော နှိုင်းယှဉ်ချက်- Folli-Surge High-Pulse Microneedle နှင့် ရိုးရိုးလက်လှိမ့်တံ

ဤသည်မှာ "လှုံ့ဆော်ခြင်း" (Activation) သို့မဟုတ် "ထိခိုက်စေခြင်း" (Damage) ၏
ကွဲပြားသော လမ်းဆုံဖြစ်သည်။

✗ ရိုးရိုးလက်လှိမ့်တံ (Ordinary Handheld Roller)

အလုပ်လုပ်ပုံ (Working Principle)

"လှုံ့ခြင်းနှင့် ဆွဲယူခြင်း" (Rolling & Dragging): အပ်များသည် ထိုးသွင်းပြီးနောက် ဆွဲယူကာ ပြန်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို အခြေခံအားဖြင့် "ဆုတ်ဖြဲခြင်း" ဖြစ်သည်။

မှန်ဘီလူးအောက်မှ အမှန်တရား (Truth Under Microscope)

V-ပုံစံ ခြစ်ရာများနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆုတ်ဖြဲဒဏ်ရာများစွာရှိသည်။

ပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်များ (Fatal Flaws)

- အသုံးမဝင်သော လမ်းကြောင်းများ (Ineffective Channels): V-ပုံစံ ခြစ်ရာများသည် သွေးရည်ကြည်နှင့် တစ်ရှူးအရည်များဖြင့် လျင်မြန်စွာ "ပိတ်ဆို့" သွားပြီး Folli-Fix လုံးဝ စိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
- အသုံးမဝင်သော ဒဏ်ရာ (Ineffective Damage): ကြီးမားသော၊ မလိုအပ်သော အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ဆုတ်ဖြဲပြီး စွမ်းအင်သည် "မွေးညင်းပေါက်များကို လှုံ့ဆော်ခြင်း" (activating hair follicles) အစား "အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း" (repairing epidermis) အတွက်သာ ကုန်ဆုံးသွားသည်။
- အန္တရာယ် မြင့်မားခြင်း (High Risk): ကူးစက်မှု၊ အရောင်ခြယ်မှု ပြောင်းလဲခြင်း (hyperpigmentation) နှင့် အမာရွတ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်။
- နာကျင်မှု မြင့်မားခြင်း (High Pain): ဆုတ်ဖြဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဒဏ်ရာသည် နာကျင်မှု သိသိသာသာ ပိုများသည်။

✓ Folli-Surge High-Pulse Microneedle အလုပ်လုပ်ပုံ (Working Principle)

"ဒေါင်လိုက် ထိခိုက်မှု အကြိမ်ရေမြင့်" (Vertical High-Frequency Pulse): ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မီ ဖိနှိပ်စက်ကဲ့သို့ တစ်စက္ကန့်လျှင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အကြိမ်ရေဖြင့် မိုက်ခရိုအပ်များကို "ဒေါင်လိုက် ၉၀ ဒီဂရီ" ထိုးသွင်းပြီး ပြန်ထုတ်သည်။

မှန်ဘီလူးအောက်မှ အမှန်တရား (Truth Under Microscope)

သပ်ရပ်သော ၉၀ ဒီဂရီ ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ (90-degree Vertical Channels) နှင့် သန့်ရှင်းသော ပတ်လည်ဒဏ်ရာများ။

တော်လှန်ပြောင်းလဲသော အားသာချက်များ (Revolutionary Advantages)

- ပြီးပြည့်စုံသော လမ်းကြောင်းများ (Perfect Channels): သန့်ရှင်း၊ သပ်ရပ်ပြီး အနက်ညီညာသော "ဒေါင်လိုက်ပြွန်များ" (vertical channels) သည် Folli-Fix အတွက် အကောင်းဆုံး ပို့ဆောင်မှုစနစ်ဖြစ်ပြီး ဇီဝရရှိနိုင်မှု (bioavailability) ကို ၁၀၀၀-၄၀၀၀% တိုးမြှင့်စေသည်။
- တိကျသော လှုံ့ဆော်မှု (Precise Activation): ထိန်းချုပ်နိုင်သော၊ ဒေါင်လိုက်ကျသော၊ မဆုတ်ဖြဲဘဲ ဖြစ်ပေါ်သော မိုက်ခရိုဒဏ်ရာများသည် Wnt/ β -catenin signal pathway ကို အထိရောက်ဆုံး လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
- အလွန်မြင့်မားသော ဘေးကင်းလုံခြုံမှု (Extremely High Safety): ဒဏ်ရာ နည်းပါးလေ = ပြန်လည်ကောင်းမွန်နှုန်း ပိုမြန်လေ = ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော အတွေ့အကြုံ။
- သက်တောင့်သက်သာရှိမှု မြင့်မားခြင်း (High Comfort): တိကျသော ထိုးသွင်းမှုကြောင့် နာကျင်မှု သိသိသာသာ လျော့နည်းသည်။

နောက်ဆုံးပိတ် အရောင်းစကားလုံး ဖောက်သည်တိုင်းကို ၁၀၀% ဘယ်လိုစည်းရုံးမလဲ

ဝန်ထမ်းများအတွက်- မေးခွန်းမေးပုံပြောင်းပါ

"ဖောက်သည်တွေကို 'ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်မလား' လို့ ထပ်မမေးပါနဲ့။ သူတို့ကို ဒီလိုမေးပါ-'ပိုက်ဆံဆက်ဖြုန်းချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အခုဝယ်ထားတဲ့ Folli-Fix နဲ့ Folli-Activ ပုလင်းတိုင်းရဲ့ ထိရောက်မှုကို ၁၀ ဆ မြှင့်တင်ချင်တာလား။"

"သူတို့ ဒီအချက်ကို နားလည်သွားတဲ့အခါ၊ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ကို ပြောပြပါ-'ဒီ ၁၀ ဆ ပိုမိုလုံ့ဆော်မှုရရှိအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ Folli-Surge ရဲ့ "high-pulse vertical channeling" နည်းပညာပဲ။ ဈေးကွက်ထဲက "roller scratches" တွေအားလုံးက သင့်ပိုက်ဆံတွေကို ဆက်လက်ဖြုန်းတီးနေရုံပါပဲ။"

ဖောက်သည်များအတွက်- တန်ဖိုးကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

"ဆံပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ 'တန်ဖိုးရှိမှု' ဆိုတာ တစ်ခါသုံးဈေးနှုန်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲ 'နောက်ဆုံးရလဒ်' ကိုကြည့်တာ။"

"ဈေးကွက်ထဲက ဘယ် 'သာမန် roller' ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှုမဆို သင့်အချိန်နဲ့ ပိုက်ဆံကို အကြီးအကျယ် ဖြုန်းတီးရာရောက်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်စေတဲ့ 'ခြစ်ရာ' နဲ့ 'စုတ်ပြဲမှု' တွေဟာ သင့် Folli-Fix စုပ်ယူမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါလိမ့်မယ်။"

"Folli-Surge ရဲ့ "high-pulse microneedle" ဟာ တစ်ခုတည်းသော စံနှုန်းပဲ။ ဒါဟာ 'microneedle' သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သင့်ဦးရေပြားအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ 'hair follicle activation surgery' နဲ့ 'nutrient delivery system' ပါ။"

"'ပျက်စီးမှု' အတွက် ပိုက်ဆံမပေးပါနဲ့။ ဒီနေ့ Folli-Surge မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး သင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ '၁၀၀% activation' အတွက် ပိုက်ဆံပေးပါ။"

နောက်ဆုံးသတိပေးချက်- ဆိုင်ကနေထွက်သွားတဲ့ ဖောက်သည်တိုင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စနစ်ရဲ့ သက်သေတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရိုးရာနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံဖြုန်းနေဦးမှာပဲ။ သင့်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိပညာနဲ့ စည်းရုံးနိုင်စွမ်းက သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ သိပ္ပံ၊ အထောက်အထား၊ စာနာစိတ်တို့ကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ကို မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။